

VEPpeak

Přenosný přístroj pro záznam zrakových evokovaných potenciálů

PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE



Inicializace

1. Připojit kabel přístroje k zásuvce USB na PC
2. V případě zasunutí do dosud nepoužívaného USB portu, vyčkat až proběhne instalace přístroje
3. Je-li přístroj v pořádku, proběhne na stimulátoru krátký záblesk
4. Spustit program
5. Zmáčknout tlačítko **Connect** (pokud je USB připojení v pořádku, objeví se v pravé dolní části programu **USB Device connected**)

Připojení vyšetřované osoby

6. Přiložit přístroj (kšilt) na vyšetřovanou osobu, připojit referenční a šumovou elektrodu na ušní lalůček, případně připojit i hřebínkové elektrody
7. Díky využití suché montáže elektrod, je vhodné chvíli počkat (cca 3 min) nebo elektrody navlhčit vodou



Vyšetření

8. Nastavit parametry vyšetření (viz popis ovládání programu) podle *protokolu vyšetření*, který je specifikován pro každý záměr samostatně
9. Instruovat vyšetřovaného, aby plnil úlohu danou *protokolem vyšetření*
10. Tlačítkem **Record** provést vyšetření a uložit je tlačítkem **Save**
11. Provést všechna požadovaná vyšetření

Ukončení

12. Pro odpojení přístroje zmáčknout tlačítko **Close** (pokud se příkaz úspěšně provede, objeví se v pravé části programu **Device can be removed**)
13. Odpojit kabel USB přístroje z PC
14. Ukončit program

